

单发钛夹、连发钛夹及连发钛夹钳

注册证编号：国械注准 20223020425

产品特点

- 用于腹腔镜和普通外科手术下血管、胆管、胰管和其它管状结构的闭合和结扎
- 单发钛夹及连发钛夹为一次性使用无菌产品，连发钛夹钳为重复性使用非无菌产品
- 连发钛夹可闭合管状组织范围： $\Phi 0.4\sim\Phi 5.5\text{mm}$
- 连发钛夹的装夹数量为5~19枚，即一次装夹后其最大施夹数量为5~19枚

单发钛夹

单发钛夹	 KJ-TJD106 (111Y.204)	 KJ-TJD206 (111Y.203)	 KJ-TJD306 (111Y.202)	 KJ-TJD406 (111Y.201)	
单动钛夹钳	104.001B $\Phi 5\times 300\text{mm}$	104.001A $\Phi 5\times 300\text{mm}$	101.001 $\Phi 10\times 330\text{mm}$ 101.001A $\Phi 10\times 330\text{mm}$ 101.001AB $\Phi 10\times 330\text{mm}$	101.001B $\Phi 10\times 330\text{mm}$ 101.001AB $\Phi 10\times 330\text{mm}$	
双动钛夹钳			101.111A $\Phi 10\times 330\text{mm}$		
直角钛夹钳			101.002 $\Phi 10\times 330\text{mm}$		
施夹器(开放)	101.138CP	101.138BP	101.138AP	101.138P	

请联系客服了解更详细信息 400-8459997

连发钛夹及连发钛夹钳

连发钛夹
KJ-TJLM19 (111Y.345 19枚装)



连发钛夹钳
KJ-TJQLM10 (111.268A)



使用方法

- 1 将活动手柄捏紧至固定手柄，将钛夹钳后部的箭头对准钛夹仓的箭头，将钛夹仓完全插入手柄后部
- 2 缓慢松开活动手柄(该操作会立即将钛夹接合到钳头中)
- 3 当使用完成或者出现彩色钛夹，则捏紧手柄将连发钛夹从连发钛夹钳中抽出



注意事项


1. 在活动手柄被捏合7档棘轮之前，活动手柄不会重新打开
2. 连发钛夹的最后两枚钛夹为彩色，以便在使用过程中识别钛夹是否被施夹完毕



3. 在松开活动手柄时，禁止瞬间松开以防止连发钛夹从钛夹钳钳口飞出
4. 应避免装有钛夹的连发钛夹钳向上空夹（夹闭后的钛夹会在重力的作用下掉入连发钛夹钳，从而引起器械故障）



钳头在水平线以上

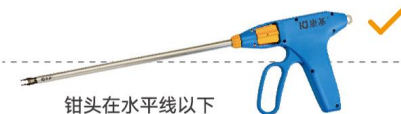

钳头在水平线以下



康德健体 积基树本

单发钛夹、连发钛夹及连发钛夹钳

注册证编号：国械注准 20223020425



股票代码：9997.HK

杭州康基医疗器械有限公司

Hangzhou Kangji Medical Instrument Co.,Ltd.

地址·浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号
Add No.1668 Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu,
Hangzhou, Zhejiang 311501, China
电话·Tel 0571-69900058
邮箱·E-mail kangji@hzkangji.com
网址·web www.hzkangji.com

北京营销中心

地址·北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109
Add 2108-2109, Block A, Global Trade Center, 36 Beisanhuan East Road,
Dongcheng District, Beijing
电话·Tel 010-58256997

☎ 400-8459997

杭州康基医疗器械有限公司

Hangzhou Kangji Medical Instrument Co.,Ltd.